

CATALOGO TÉCNICO DE PRODUTO

GLUTACIN 28 (GLUTARALDEÍDO 2,0%)

INDICAÇÃO

Utilizado na desinfecção de artigos semicríticos hospitalares, odontológicos e laboratoriais, sensíveis ao calor.

MODO DE USAR

O produto deve ser ativado adicionando o conteúdo do frasco de Líquido ativador dentro do recipiente contendo a solução de Glutacin 28 e agitar até a homogeneização total. A solução ativada apresenta cor esverdeada e permanecerá ativa por 28 dias. Ao utilizar a solução ativada coloque os instrumentos ou objetos limpos e secos em submersão e deixar um tempo de 10 (dez) horas para a desinfecção dos artigos. Enxágue o material após a desinfecção com água estéril.



COMPOSIÇÃO

Glutaraldeído 2,0%, tensoativo e água deionizada.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

APRESENTAÇÕES

Galão plástico de 5000 ml (caixa / 02 unidades) e frasco PET de 1000ml (caixa / 12 unidades).

PRECAUÇÕES DE USO:

Ver informações adicionais completas na rotulagem do produto

Reg. MS n.º 33301.0004/002-8

n.º 33301.0004/001-1

OUTRAS INFORMAÇÕES:

www.cinordsudeste.com.br

SAC – 16. 3987.3786

CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA
Rua Benedito da Costa nº 20 – Serrana – SP
INDUSTRIA BRASILEIRA