

Indazyme 6 PLUS DETERGENTE ENZIMÁTICO

**PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS**

INDICAÇÃO:

O Indazyme 6 Plus é um eficiente detergente enzimático para redução de resíduos orgânicos em artigos e instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais.

Indicado para limpeza manual e automatizada.

COMPOSIÇÃO:

Água Deionizada, Álcool Isopropílico, Propilenoglicol, Emulsão de Polidimetilsiloxano, Enzima Lipolítica (LIPASE), Enzimas Amilolíticas (CARBOIDRASE, ALFA-AMILASE e CELULASE), Enzimas Proteolíticas (PROTEASE, PEPTIDASE), Derivado de Isotiazolinona, Nonilfenol 9,5 EO, Nonilfenol 7 EO, Formiato de Sódio, Cloreto de Cálcio, Amida de Trietanolamina 85%, CI42090 e CI19140.

INSTRUÇÕES DE USO:

Para Limpeza Automatizada: Diluir 2 mL de Indazyme 6 Plus para cada litro de água. Temperatura de uso da solução enzimática para Limpeza Automatizada: 40°C a 55°C. Deixar os materiais em imersão pelo tempo de 5 minutos. Observar recomendações do fabricante do equipamento. Para Limpeza Manual: Diluir 2 mL do Indazyme 6 Plus para cada litro de água. Temperatura de uso da água para Limpeza Manual: 30°C a 40°C. Deixar os materiais em imersão pelo tempo de 5 minutos. Rendimento por litro: até 500 litros de solução diluída. Recomendações quanto à qualidade da água utilizada no preparo da solução de limpeza (pH: de 6,0 a 9,0; condutividade máxima: 200 µS/cm; dureza máxima: 500 mg/L). pH da solução pura a 25°C: 6,0 a 8,0. **UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS O PREPARO. A REUTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA.**

Teores dos tensoativos: NONILFENOL 7 EO (2%) e NONILFENOL 9,5 EO (3%).

Atividade Proteolítica mínima: 0,04 UP.mL⁻¹.min⁻¹; Atividade Amilolítica mínima: 0,09 UA.mL⁻¹.min⁻¹.

CONSERVAÇÃO:

Manter o produto em sua embalagem original, fechado e ao abrigo da luz solar direta e do calor excessivo.

ADVERTÊNCIAS:

Não misturar com outros produtos. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele.

PRECAUÇÕES:

ATENÇÃO! Provoca irritação ocular e cutânea.

Usar luvas, avental, óculos e máscara de proteção durante a manipulação do produto.

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800 722 6001.

LOTE E VALIDADE:

Lote/Fabricação: Verificar embalagem. Validade: 24 meses.

APRESENTAÇÕES:

100mL - 96 ALMOTOLIAS DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;
250mL - 60 ALMOTOLIAS DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;
500mL - 24 FRASCOS DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;
500mL DOSADOR - 12 FRASCOS DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;
1L - 12 FRASCOS DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;
1L DOSADOR - 8 FRASCOS DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;
3,6L - 4 GALÕES DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;
5L - 4 GALÕES DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;
20L - BOMBONA PLÁSTICA DESCARTÁVEL.

**Algumas apresentações, venda sob consulta.*

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS:

ASPECTO: Líquido
COR: Verde escuro
ODOR: Característico

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS:

PH: 6,00 a 8,00
DENSIDADE (g/cm³): 0,990 a 1,100

REGISTRO ANVISA:

Indazyme 6 Plus-Detergente Enzimático-100mL: Registro MS – 3.3470.0002.001-1;
Indazyme 6 Plus-Detergente Enzimático-250mL: Registro MS – 3.3470.0002.001-1;
Indazyme 6 Plus-Detergente Enzimático-500mL: Registro MS – 3.2637.0024.002-8;
Indazyme 6 Plus-Detergente Enzimático-500mL Dosador: Registro MS – 3.2637.0024.002-8;
Indazyme 6 Plus-Detergente Enzimático-1L: Registro MS – 3.2637.0024.002-8;
Indazyme 6 Plus-Detergente Enzimático-1L Dosador: Registro MS – 3.2637.0024.002-8;
Indazyme 6 Plus-Detergente Enzimático-3,6L : Registro MS – 3.2637.0024.003-6;
Indazyme 6 Plus-Detergente Enzimático-5L: Registro MS – 3.2637.0024.003-6;
Indazyme 6 Plus-Detergente Enzimático-20L: Registro MS – 3.2637.0024.004-4.
INDÚSTRIA BRASILEIRA. Responsável técnico: Antônio Juliano Arriel - CRQ-II 02301519



**EMPRESA CERTIFICADA PELA ANVISA
EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO**